



# 一次性使用采样器 说明书

## 【产品名称】

一次性使用采样器

## 【预期用途】

本产品用于样本的收集、运输和储存。

## 【产品描述】

本产品由拭子和含保存液（三羟甲基氨基甲烷、无水乙酸钠）的管组成，非无菌提供。

## 【型号/规格】

400 $\mu$ L/支，1mL/支，2mL/支，3mL/支，4mL/支，5mL/支，6mL/支。

## 【包装规格】

1人份/套，50套/包

2人份/套，50套/包

## 【储存条件及有效期】

产品使用前可在常温10-30 $^{\circ}$ C保存2年，可在2-40 $^{\circ}$ C短期运输（不超过7天）。


产品使用后，可在常温下保存样本1周。

## 【产品简介】

本产品采用医疗专用的聚氨脂海绵为原材料，具有吸液性强、柔软洁净、发尘量低等优点。采样拭子头可折断，使用方便。采用的物料对微生物无毒害，能大量地增加样本的采集、释放量，增强样本送检期间的保存效果。可在常温下保持样本中的核酸在一定时间内完整、不降解，为获得下游实验所需要的高质量核酸提供了可靠保障。

## 【操作步骤】

1. 取样前清洁双手，撕开采样拭子外包装，将拭子取出。注意不要接触拭子头。
2. 按照不同的采样要求，用拭子在相应部位采样。
3. 采样后迅速将拭子放入装有保存液的采样管中，避免接触其他部位。
4. 折断拭杆，弃去尾部，随即旋紧管盖，完成取样。

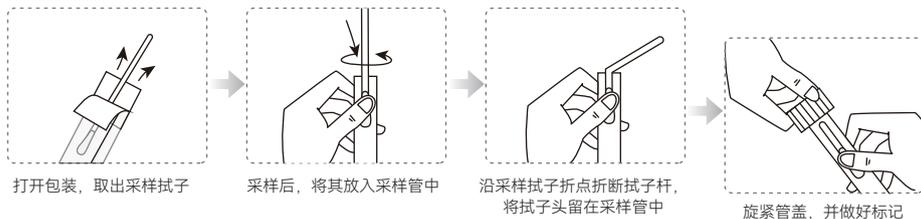

## 【注意事项】

1. 本产品仅用于样本采集后运送过程中的保存，仅供一次性使用，使用前检查包装是否破损，如有破损严禁使用。
2. 本产品用后应按医院或环保部门规定处置废弃物。
3. 使用前应仔细阅读说明书，在有效期内使用。